

Instrucciones de recogida de la muestra

01. 

Abre una de las torundas.
Tómala por el extremo para evitar contaminaciones.

02. 


La muestra se puede tomar de 3 formas:

- 1. Aparato genital masculino:** frota la torunda sobre la superficie de uretra (sin introducirla), glande, corona del glande, frenillo y por la parte interior del prepucio.
- 2. Aparato genital femenino:** introduce la torunda dentro de la vagina (unos 4-5 cm) y da 10 vueltas.
- 3. En caso de lesión visible, frota la torunda sobre ella.**


03. 

Vuelve a introducir la torunda en el tubo colector y **asegúrate de que queda bien cerrado**. La pegatina identificativa debe estar perfectamente pegada sobre el tubo.

Si no se evidencian lesiones, utiliza la segunda torunda para recoger otra muestra frotándola alrededor del triángulo púbico (región externa de los genitales).

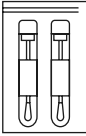04. 

Una vez recogidas las muestras, **introduce los 2 tubos colectores dentro de la bolsa de seguridad UN3373**.

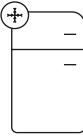05. 

Idealmente, **mantén las muestras refrigeradas dentro de su bolsa** hasta el momento de llevarlas al centro que elijas.

06. 


Rellena el formulario con tus datos y **fírmalo**.

Instrucciones de retorno

Verifica de nuevo que **has registrado tu prueba en nuestra web y que has pegado la pegatina identificativa sobre los tubos de las muestras**, tal y como se indica en pasos previos. De lo contrario, tus muestras no podrán ser procesadas.



Registra tu prueba en nuestra web:
Visita **www.vivolabs.es/registro-kit** y **completa el registro**. El código de tu prueba corresponde con el número de la pegatina identificativa que encontrarás dentro de la caja.

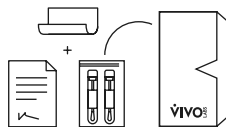


Prepara tu caja e introduce:

- Formulario general firmado y rellenado con tus datos.
- Bolsa de seguridad **UN3373** con los 2 tubos colectores.
- Pegatinas sobrantes.

Guarda tu caja preparada en el sobre de SEUR incluido.

Si es posible, mantén la muestra refrigerada hasta su entrega.

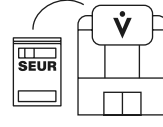

Instrucciones para enviar tu muestra

Encontrarás el enlace para enviar tu muestra en el email de instrucciones de retorno.

Puedes enviar tu caja de **2 formas**:

1 Programa la recogida en tu domicilio: ponte en contacto con nosotros en **info@vivolabs.es** o en el teléfono **900 74 72 18**.

2 Entrega en clínicas de VIVO.

¡Listo! Espera tus resultados.

Resultados de tu prueba



1. Una vez recibamos tu prueba, la procesaremos en nuestro laboratorio propio.



2. En 3-4 días hábiles, te enviaremos un email confirmando que ya tienes disponibles los resultados de tu prueba en nuestro Portal del Paciente.

Podrás consultarlos en la siguiente dirección:
https://pacientes.vivodiagnostico.com/



Todos los estudios de VIVOLABS **incluyen una llamada informativa gratuita con nuestro equipo de profesionales en salud** para comunicarte tus resultados y recomendarte pasos a seguir.


Si después de esta llamada quieres recibir más asesoramiento, siempre puedes adquirir la consulta que más se ajuste a ti en nuestra tienda online **www.vivolabs.es**

Instrucciones

Prueba del Virus de Papiloma Humano

Toma de muestra: torunda

¿Qué incluye este pack?

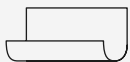

Pegatinas identificativas de tus muestras



2 tubos colectores con torunda (bastoncillo)



Bolsa de seguridad UN3373



Formulario general



Sobre para envío de SEUR

⚠ Aviso importante

- No se puede recoger la muestra durante el **periodo menstrual**.
- No se puede recoger la muestra durante un **tratamiento antibiótico o antimicótico**.
- No utilices cremas, colonias, óvulos y/o gel en la zona genital durante **al menos 5 días antes de la toma de muestra**.
- En ausencia de lesión, te recomendamos realizar un aseo con agua y jabón de tus genitales externos antes de tomar la muestra. **Es importante aclarar y secar bien la zona.**
- En caso de presentar aparato genital femenino, si estás **embarazada y/o presentas síntomas de parto prematuro**, un especialista deberá tomar tu muestra.
- Te recomendamos no haber tenido relaciones sexuales con eyaculación un mínimo de **48 horas previas a la toma de muestra**. De lo contrario, los resultados podrían verse alterados.
- Antes de enviar tu prueba, verifica que has registrado tu prueba en nuestra web y que has pegado la pegatina identificativa sobre los tubos de las muestras, **de lo contrario tu prueba no podrá ser procesada**.

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ti: no dudes en contactar con nosotros si lo necesitas

 900 74 72 18

 info@vivolabs.es

 www.vivolabs.es